



## Un aiuto per difendere la dignità e la bellezza del parto

Traxi consente una retrazione rapida e facile del pannicolo negli interventi addominali, lasciando libero il personale di occuparsi della cura della paziente.



### RETRAZIONE CONTROLLATA e AFFIDABILE.



#### Benefici per la paziente

- ✓ Libertà di movimento
- ✓ Possibilità di allattare mentre si indossa Traxi
- ✓ Utilizzo anche nel post-operatorio

#### Benefici per il personale medico

- ✓ Migliore visibilità del sito di incisione
- ✓ Eliminazione del nastro chirurgico e delle pinze
- ✓ Evita la retrazione manuale



Senza Traxi



Con Traxi




Traxi può essere utilizzato fino a 24 ore nel post-operatorio



Cura delle pazienti con maggior premura e dignità

# Fasi per una migliore esposizione del sito chirurgico

## 1 Retrazione manuale

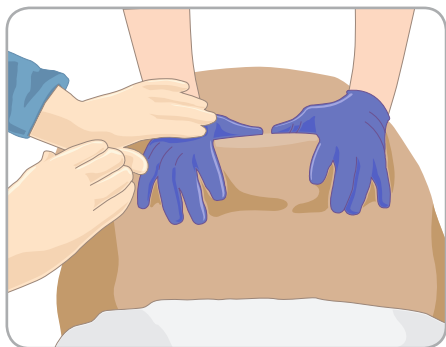


Retrarre il pannicolo manualmente per esporre il sito chirurgico

## 2 Rimozione linguetta "A"




Rimuovere la linguetta "A".

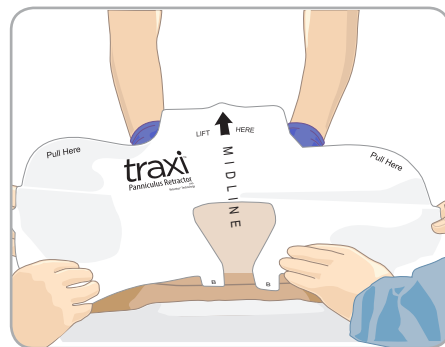


Posizionare il retrattore 5cm sopra la linea di incisione.  
Allineare alla linea mediana e applicare sulla paziente

## 3 Rimuovere i pannelli "B"

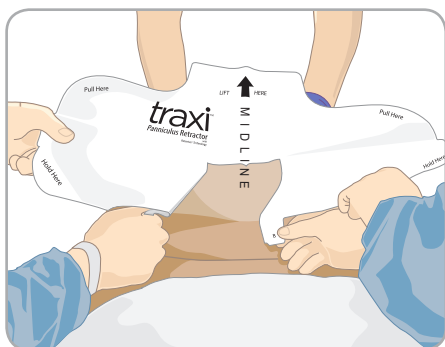


Rimuovere i pannelli "B"

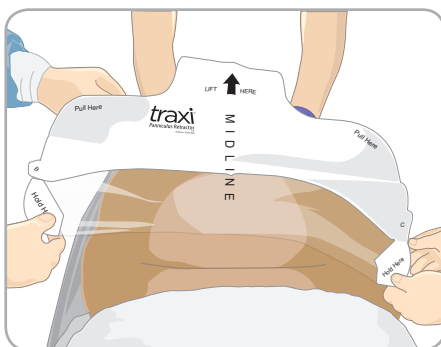


Mantenere Traxi in tensione mentre lo si distende sulla pelle della paziente, verso l'esterno della linea mediana

## 4 Allentare e Applicare

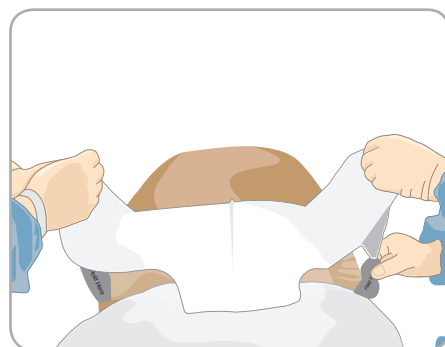

Piegare il dispositivo con movimento retrogrado e allentare il pannicolo riportandolo nella sua posizione naturale.  
Rimuovere il pannello C tirando simultaneamente le linguette "C" da ciascun lato.

## 5 Tendere, Sollevare e Tirare

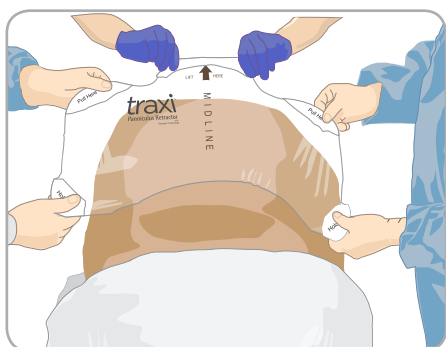

Con tensione, sollevare e tirare il retrattore in direzione cefalica.  
Ancorare allo xifoide

### Informazioni per l'ordine

| Descrizione Prodotto       | Code     | Pz./Scatola |
|----------------------------|----------|-------------|
| Traxi Panniculus Retractor | PRS-0530 | 5/cad.      |

Fornito in confezione singola - Monouso  
Sterilizzato a raggi Gamma - marcato CE



**traxi**<sup>®</sup>  
Panniculus Retractor

Distributore esclusivo per l'Italia:



**RIMOS.**  
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY  
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

[clinicalinnovations.com](http://clinicalinnovations.com)

747 West 4170 South | Murray, Utah USA 84123  
Phone +1.801.268.8200 | Fax +1.801.266.7373 |  
Toll Free +1.888.268.6222

© Clinical Innovations, LLC. All rights reserved.



**CLINICAL  
INNOVATIONS**  
forMOM. forBABY. forLIFE.™